



# **PASKAL 3D Version 4.0** **comportant le module PASKAL N**

## **Guide d'installation**



1	Préparations de l'installation.....	1
2	Notice pour le copiage des réglages de base .....	3
3	Autres informations utiles .....	4


## 1 Préparations de l'installation

Pour l'utilisation de PASKAL N vous avez besoin de :

- Vos données d'accès à la licence PASKAL 3D
- Mot de passe pour votre Apple ID
- l'activation du module PASKAL N (AddOn à la licence de base) >> est préparée par IPRO
- un Apple TV 4 / ou 4K
- deux iPads compatibles iOS12  
(un pour le contrôle et un pour l'affichage des tests au client)
- un téléviseur 3D à polarisation circulaire
- la nouvelle application PASKAL 3D de l'App Store,  
même si vous possédez déjà l'ancienne application PASKAL 3D . **Coûts : 23,99 €.**



1. Ouvrez l'App Store sur votre iPad et recherchez "PASKAL 3D".

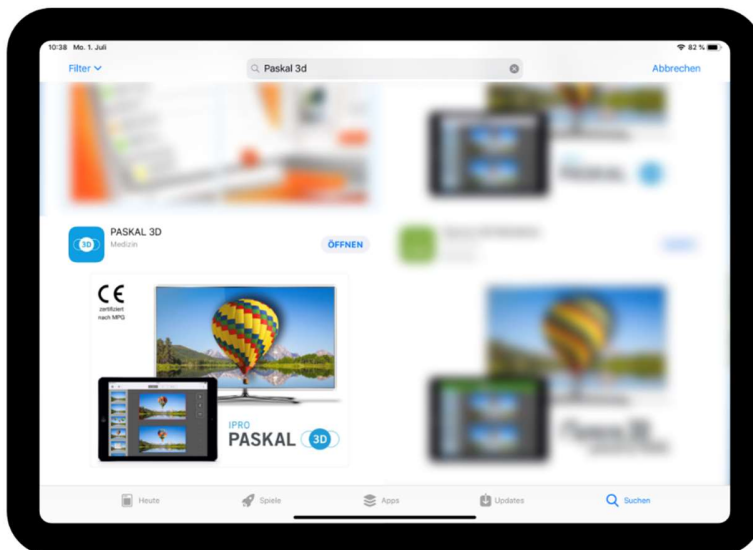

2. Achetez et installez la **nouvelle** application. Suivez les instructions sur l'iPad.
3. Nous vous recommandons d'utiliser toujours **le même identifiant Apple** pour tous les appareils Apple que vous utilisez pour PASKAL 3D. Ainsi, vous n'avez besoin d'acheter l'application qu'une seule fois. Sur les autres appareils, vous trouverez ensuite l'application PASKAL 3D dans vos achats. Installez ensuite la **nouvelle** application PASKAL 3D également sur votre Apple TV et sur les autres iPads.
4. Après avoir installé la nouvelle application PASKAL 3D sur tous les appareils Apple, vous devez encore vous enregistrer. Vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de passe de votre licence PASKAL 3D (généralement les mêmes que vos identifiants Dr. IPRO). L'enregistrement se fait directement via Apple TV. Un guide étape par étape peut être trouvé dans la

documentation :

<http://static.ipro.de/iprohelp/Fr/pdf/PASKAL/PasKal3D%20menu%20Apple%20TV.fra.pdf>



5. Une fois l'enregistrement réussi, vous devez adopter les paramètres de base tels que la distance de réfraction, la taille de l'écran, etc. pour votre iPad.

Nouveau : le mode "Multi-device" - il est automatiquement activé à la livraison de la nouvelle application, car ceci est nécessaire pour le module PASKAL N. Pour économiser la batterie de votre iPad, nous vous recommandons de désactiver Bluetooth.

6. Vous devez à nouveau créer vos propres séries de tests dans la nouvelle application. Pour ce faire, nous vous recommandons la procédure suivante :

- Démarrez l'ancienne application sur votre iPad et Apple TV et connectez les deux appareils.
- Ouvrez « Configurer les séries de tests ».
- Prenez des captures d'écran pour documenter vos séries de tests.

Selon l'âge de l'iPad, appuyez simultanément sur les boutons « Home + On/Off » pour une capture d'écran, ou bien sur les boutons « On/Off + Plus fort » sur le nouvel iPad sans le bouton « Home ».

- Fermez les deux anciennes applications et démarrez les deux nouvelles applications. Connectez l'iPad à l'Apple TV. Sélectionnez « Menu »  > « Configurer les séries de tests ».  et créez vos propres séries de tests.

Une description détaillée sur ce sujet peut également être trouvée dans la documentation

<http://static.ipro.de/iprohelp/Fr/pdf/PASKAL/3.3%20Configurer%20s%C3%A9ries%20de%20tests.pdf>

- Vous pouvez définir le type d'optotype et l'acuité visuelle de départ pour chaque série de tests dans la nouvelle application.

## 2 Notice pour le copiage des réglages de base

Dans la mesure du possible ces réglages de base doivent être effectué pour chaque iPad qui contrôle l'Apple TV.

1. Distance de réfraction en mètres \_\_\_\_\_

*A trouver dans l'ancienne App ici : Réglages > Distance*

2. Taille de l'écran en pouces \_\_\_\_\_

*A trouver dans l'ancienne App ici : Réglages > Taille/Résolution*

3. Mode 3D \_\_\_\_\_

*A trouver dans l'ancienne App ici : Réglages > Taille/Résolution*

4. Miroitage

*A trouver dans l'ancienne App ici : Réglages > Distance*

Activer miroitage	Oui / Non
-------------------	-----------

Ecran de Bienvenue	Oui / Non
--------------------	-----------

5. Mode Multi-Appareils Oui / Non

*A trouver dans l'ancienne App ici : Réglages > Connexion*

6. Couplage Acuité Oui / Non

*A trouver dans l'ancienne App ici : Réglages > Réglages de Base*

### 3 Autres informations utiles

Après avoir installé et enregistré la nouvelle application PASKAL 3D, une période de transition de 4 semaines commence. Dans cette phase, vous aurez le temps de vous familiariser avec la nouvelle application PASKAL 3D. En même temps, vous pouvez continuer à travailler avec l'ancienne application PASKAL 3D comme d'habitude. Dès que vous passez définitivement à la nouvelle application, nous vous recommandons de supprimer l'ancienne application PASKAL 3D de vos appareils.

Nous aimerions vous donner quelques conseils importants pour un travail en toute fluidité avec PASKAL 3D dans cette phase :

- Après avoir installé la nouvelle application, il y a deux installations PASKAL 3D sur votre système. Ceci a l'avantage que vous pouvez continuer à travailler avec l'ancienne version comme d'habitude pendant un certain temps, mais l'inconvénient que des problèmes de connexion peuvent survenir si une deuxième version de l'application est ouverte en arrière-plan.  
Par conséquent, veuillez-vous assurer que vous fermez correctement les applications et que vous travaillez soit avec la nouvelle version seulement, soit avec l'ancienne version seulement. Comment démarrer et fermer correctement les applications sur les appareils est décrit en détail dans la documentation :  
<http://static.ipro.de/iprohelp/Fr/pdf/PASKAL/2%20PASKAL%203D%20%E2%80%93%20Notions%20de%20base.pdf>
- Nous vous recommandons de toujours démarrer l'application d'abord sur Apple TV et ensuite sur iPad.  
Vous pouvez reconnaître la nouvelle application PASKAL 3D sur l'iPad ainsi que sur Apple TV par cette nouvelle icône d'application :

